


energy line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

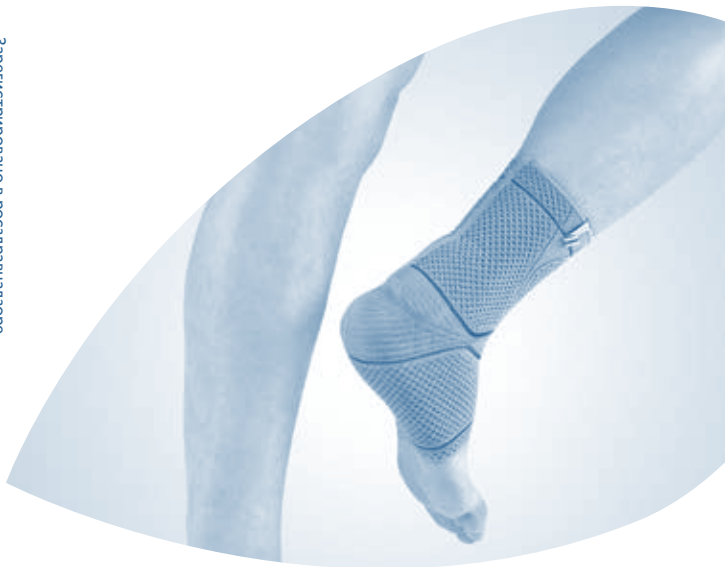

Инструкция по применению
ортопедического изделия

ANCLEFLEX

БАНДАЖ НА АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ

DAN-101

WWW.ORLETT.RU

PROPRIOPRESSION® – инновационная зарегистрированная технология вязки из уникальных материалов, обеспечивающая доказанное усиление проприоцепции (мышечного чувства) и ощущения защищенности сустава. Эффект достигается за счет идеально точного прилегания ортезов и медицинской дозированной поддержки суставов. Естественный термо- и влагообмен, микро-массажный эффект в зоне нагрузок ускоряют восстановление и обеспечивают исключительный комфорт при любой активности. Усиление проприоцепции в ортезах **ORLETT Energy Line**, изготовленных по технологии **PROPRIOPRESSION®**, протестировано и подтверждено ведущими медицинскими научно-исследовательскими центрами.

КОНСТРУКЦИЯ И СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ВЯЗКОЭЛАСТИЧНАЯ ВСТАВКА ОБЛАСТИ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

Улучшает локальное кровообращение
Способствует снижению болевых ощущений
Способствует уменьшению воспалительных явлений
Ускоряет восстановительные процессы
Расширяет объем движений
Оказывает дополнительное массажное действие

ПЛОСКАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ВЯЗКА

Обеспечивает максимальное анатомическое прилегание
Стабилизирует и разгружает сустав
Распределяет компрессию по всей длине бандажа, снижая её к краям
Обладает противоотёчным действием
Сохраняет нормальное кровообращение, не создает эффект «жгута»



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- реабилитация после травм и операций на ахилловом сухожилии;
- ахиллодиния, тендинит, паратендинит, подсухожильный бурсит, деформация Хаглунда;
- профилактика травм ахиллова сухожилия, в т.ч. в спорте.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- гнойно-септические заболевания кожных покровов в области применения изделия;
- индивидуальная непереносимость материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения изделия.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж, удерживая двумя руками за середину вязкоэластичных вставок, надевают как носок так, чтобы вязкоэластичные вставки расположились сразу «за и под» лодыжками. Проконтролируйте положение надетого бандажа на ноге (шов должен проходить по середине пятки).

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность голени выше лодыжек.

Согласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

Размер	Окружность голени выше лодыжек, см
XS	17-20
S	20-22
M	22-24
L	24-26
XL	26-28
XXL	28-30

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить изделие. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

40% полиамид, 10% эластан, 3% полиэстер, 2,2% термопластичный полиуретан, 44,8% силикон.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. DAN-101, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием. Бандаж на голеностопный сустав, арт. DAN-101. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01698 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

